


## 操作方法



### 電源スイッチ

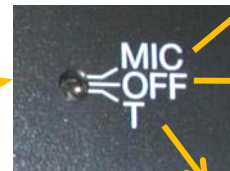

マイクの音を聞く時は**MIC**

使わないときは**OFF**

磁気ループの音を聞く時は**T**

### 音量

上げ過ぎないように注意

### イヤホン

ステレオイヤホンを利用して下さい。モノラルは使わないで下さい。

### マイク

市販のパソコン用マイクロホンなどが使えます。電源が供給されます。

テレビ音声やワイヤレスマイクの出力もこの接続できます。音量が大きすぎるときは「外部」に接続。



電極が3つに分かれているもの

## 「外部」の使い方

「マイク」と「イヤホン」の間にある「外部」は、入力としても出力としても働きます。

少し大きめの信号(ライン・レベル)はここへ入れて下さい。小さい信号は「マイク」へ。

「マイク」へ入れたマイクロホンの信号、磁気ループの信号は増幅されてこの端子に出力されます。他の装置(ループアンプなど)へつなぐことができます。

## ACアダプタの使用

5VのACアダプタをつなぐと内蔵電池の接続は切れます。ACアダプタ使用時は最大出力が大きくなります。小型ループなどは駆動できます。

## 電池交換



単三乾電池を使用して下さい。マンガン電池、アルカリ電池どちらでも動作します。

凸(+極)を先に入れると、スムーズに入ります。

**聴力保護のため音量を上げ過ぎないようにご注意ください。**